



Veterinair bloedglucosecontrolesysteem
voor katten en honden

PETRACKR®

Gebruiksaanwijzing voor
mobiele app
voor Android en iOS



Bedankt dat u hebt gekozen voor PETRACKR®!

Het veterinaire bloedglucosecontrolesysteem PETRACKR® is een van de nieuwste productinnovaties van Universal Biosensors.

Monitor effectief de diabetes van uw huisdier door gebruik te maken van de PETRACKR®-app in combinatie met de PETRACKR®-glucosemeter. Houd eenvoudig de bloedglucosewaarden van uw huisdier en andere levensstijlfactoren bij.

Met de PETRACKR®-app en de bijbehorende bloedglucosemeter en teststrips kunt u uw geliefde huisdier zorg bieden die vergelijkbaar is met de zorg die aan mensen wordt geboden.

Voordat u begint

Als u de app gebruikt in combinatie met een PETRACKR[®]-glucosemeter, lees dan de PETRACKR[®]-gebruikershandleiding door. Deze is beschikbaar op:

www.support.universalbiosensors.com/en/knowledge/petrackr-user-guide
of scan de onderstaande QR-code.



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

WAARSCHUWING:

- Als u het PETRACKR[®]-systeem bij meerdere katten en honden gebruikt, houd dan rekening met het risico op overdracht van infectieziekten of andere door bloed overdraagbare ziekteverwekkers.
- Uitsluitend voor gebruik bij katten en honden.
- NIET VOOR GEBRUIK BIJ MENSEN.

Beoogd gebruik

De mobiele PETRACKR[®]-app biedt een secundair display voor de PETRACKR[®]-glucosemeter om de glucose van katten en honden te controleren als onderdeel van diabetesmanagement, te gebruiken door dierenartsen en huisdiereigenaren.

Het veterinaire PETRACKR[®]-bloedglucosecontrolesysteem is bedoeld

voor het uitvoeren van kwantitatieve metingen van glucose (suiker) in verse capillaire volbloedmonsters afkomstig van de oorschelp of het zoolkussen. Het systeem is bedoeld om bij één huisdier te worden gebruikt en mag niet worden gedeeld.

Het veterinaire PETRACKR[®]-bloedglucosecontrolesysteem is bedoeld voor in-vitrodiagnostisch gebruik voor bloedglucosecontroles bij katten en honden als onderdeel van diabetesmanagement, te gebruiken door dierenartsen en huisdiereigenaren. Het veterinaire PETRACKR[®]-bloedglucosecontrolesysteem is niet bedoeld voor gebruik bij ernstig zieke patiënten resp. huisdieren, patiënten resp. huisdieren in shock, uitgedroogde patiënten resp. huisdieren of hyperosmolaire patiënten resp. huisdieren.

Draadloze Bluetooth[®]-technologie

Draadloze Bluetooth[®]-technologie wordt gebruikt door sommige smartphones en vele andere apparaten. Uw PETRACKR[®]-glucosemeter maakt gebruik van draadloze Bluetooth[®]-technologie voor het koppelen en verzenden van de glucoseresultaten van uw patiënt resp. huisdier naar compatibele draadloze apparaten. De PETRACKR[®]-glucosemeter is ontworpen om te werken met de mobiele PETRACKR[®]-app. Ga naar <http://www.universalbiosensors.com/products/petrackr/> voor informatie over welke draadloze apparaten compatibel zijn met uw PETRACKR[®]-glucosemeter en waar/hoe u de mobiele PETRACKR[®]-app kunt downloaden op uw compatibele draadloze apparaat.

Wanneer u het PETRACKR[®]-systeem gebruikt, raden wij aan om uw PETRACKR[®]-

glucosemeter te koppelen met een compatibel draadloos apparaat en uw resultaten bij te houden. [Zie pagina 7](#) en raadpleeg de PETRACKR®-gebruikershandleiding voor koppelinstructies.

Als u interferentieproblemen ondervindt met de glucosemeter, probeer dan de afstand tussen de glucosemeter en de bron van de interferentie te vergroten. U kunt het elektronische apparaat of de antenne ook verplaatsen om het probleem op te lossen.

Deze richtlijnen helpen ervoor te zorgen dat uw glucosemeter de werking van andere elektronische apparaten in de buurt niet beïnvloedt. Bovendien mogen andere elektronische apparaten het gebruik van uw glucosemeter niet beïnvloeden.

WAARSCHUWING: De Bluetooth®-functie op uw glucosemeter stuurt testresultaten naar uw compatibele draadloze apparaat. Om te voorkomen dat resultaten van patiënten resp. huisdieren van anderen naar uw compatibele draadloze apparaat worden verzonden, mag u uw glucosemeter NIET door iemand anders laten gebruiken om de bloedglucose van hun patiënt resp. huisdier te testen.

WAARSCHUWING: Op locaties waar het gebruik van een mobiele telefoon niet is toegestaan, zoals ziekenhuizen, sommige zorginstellingen en vliegtuigen, moet u de Bluetooth®-functie uitschakelen. Raadpleeg de PETRACKR®-gebruikershandleiding voor meer informatie. Bluetooth®-handelsmerk


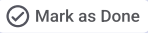





















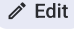












Het Bluetooth®-woordmerk en -logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Universal Biosensors Pty. Ltd. is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Inhoudsopgave

VOORDAT U BEGINT	3
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE	3
Beoogd gebruik	3
Draadloze Bluetooth®-technologie	3
INHOUDSOPGAVE	5
PETRACKR®-SYMBOLLEN EN -PICTOGRAMMEN	7
MOBIELE PETRACKR®-APP DOWNLOADEN EN INSTALLEREN	8
VOOR HET INSTALLEREN OP ANDROID-APPARATEN	8
VOOR HET INSTALLEREN OP IOS-APPARATEN	8
COMPATIBELE DRAADLOZE APPARATEN	9
ONBOARDING	10
EEN GEBRUIKERSACCOUNT AANMAKEN	11
INLOGGEN MET E-MAILADRES	11
INLOGGEN MET UW GOOGLE/APPLE ID:	11
Google-authenticatie	11
Apple-authenticatie (alleen iOS)	12
ALGEMENE VOORWAARDEN EN PRIVACYBELEID	12
REGISTRATIEPAGINA	13
E-MAILVERIFICATIE	13
UW EERSTE HUISDIERPROFIEL AANMAKEN	15
EEN HUISDIERPROFIEL TOEVOEGEN MET DE PETRACKR®-GLUCOSEMETER	15
Glucosemeter koppelen	16
Glucosemeterprofiel koppelen	16
EEN HUISDIERPROFIEL TOEVOEGEN ZONDER DE PETRACKR®-GLUCOSEMETER	17
GEGEVENS VAN UW HUISDIER TOEVOEGEN	17
EEN BESTAAND HUISDIERPROFIEL MET DE GLUCOSEMETER KOPPELEN	18
DASHBOARD	19
EEN BLOEDGLUCOSEWAARDE TOEVOEGEN	19
Synchroniseren met glucosemeter	19
BLOEDGLUCOSEWAARDEN HANDMATIG TOEVOEGEN	20
EEN MAALTIJD TOEVOEGEN	21
EEN INSULINEDOSIS TOEVOEGEN	21
EEN BEWEGING TOEVOEGEN	22
HERINNERINGEN	23
MELDINGEN	24

LOGBOEK	25
GRAFIEKEN	26
GRAFIEKPANEEL	27
SAMENVATTINGSPANEEL	28
RAPPORTEN	29
PDF-RAPPORT	30
Overzichtsgrafiek	30
Samenvatting gebeurtenissenlogboek	30
Bloedglucosegrafiek	31
ACCOUNTINSTELLINGEN	32
GEBRUIKERSPROFIEL	33
Naam wijzigen	33
Wachtwoord wijzigen	33
Account wissen	34
WACHTWOORD VERGETEN	35
HUISDIERPROFIEL	36
PROBLEMEN OPLOSSEN	37
KLANTENSERVICE	37
FOUTMELDINGEN EN ANDERE MELDINGEN	37

PETRACKR®-symbolen en -pictogrammen

 Verplicht veld	 Mark as Done	Voltooide herinnering markeren
 Wachtwoord weergeven	 Done	Voltooide herinnering
 Wachtwoord verbergen	 Refresh	Glucosemeterlijst vernieuwen
 Lopende activiteit	 Cat	Huisdiertype kat
 Details	 Dog	Huisdiertype hond
 Glucosemeters		Aanstaande herinnering
 Bloedglucosewaarde, logboek of herinnering		Voltooide herinnering
 Bloedglucosewaarde van glucosemeter		Verlopen herinnering
 Bloedglucosewaarde, maaltijd, insulinedosis of beweging toevoegen	 Link	Profiel van uw huisdier koppelen met uw PETRACKR®-glucosemeter
 Laatste bloedglucosewaarde uit uw glucosemeter halen	 More	Meer instellingen
 Glucosemeter is niet gekoppeld en synchroniseren is niet beschikbaar		Knop terug of vorige
 Notities met betrekking tot voedselinname of voedselkeuzes		Knop volgende of vooruit
 Notities met betrekking tot insuline-inname	 Edit	Profiel van uw huisdier bewerken
 Herinneringsmeldingen		Foto van uw huisdier bewerken
 Notities met betrekking tot de routines of fysieke activiteiten van uw huisdier		Inzoomen op de grafiek voor een meer gedetailleerde weergave van de gegevens
 Een herinnering voor bloedglucosewaarde, maaltijd, insulinedosis of beweging toevoegen		Uitzoomen op de grafiek voor een bredere weergave van de gegevens
 Een bloedglucosewaarde, maaltijd, insulinedosis of beweging toevoegen		Profiel van uw huisdier is gekoppeld met uw PETRACKR®-glucosemeter
 Camera openen om een foto van uw huisdier te maken	 Gallery	Fotogalerij openen om een foto van uw huisdier te selecteren
 Naar het dashboard	 Logbook	Logboek van uw huisdier met bloedglucosewaarden, maaltijden, insulinedoses en beweging bekijken
 Bloedglucosegrafieken bekijken	 Reports	Overzichtsrapport genereren
 Nieuw huisdierprofiel toevoegen		

Mobiele PETRACKR®-app downloaden en installeren

Raadpleeg de website van Universal Biosensors voor informatie over ondersteunde apparaten en besturingssystemen.

Zoek op uw compatibele apparaat in de Apple App Store of de Google Play Store naar de "PETRACKR" van Universal Biosensors.

Of

Scan de onderstaande QR-code die overeenkomt met het besturingssysteem op uw apparaat om de app te installeren.

Tijdens het installatieproces kan u gevraagd worden om uw Google- resp. Apple-inloggegevens te verifiëren.

Voor het installeren op Android-apparaten



Voor het installeren op iOS-apparaten



Compatibele draadloze apparaten

Voor informatie over welke draadloze apparaten compatibel zijn met uw PETRACKR®-glucosemeter en waar/hoe u de mobiele PETRACKR®-app kunt downloaden op uw compatibele draadloze apparaat, gaat u naar:

www.universalbiosensors.com/products/petrackr/

of scant u de onderstaande QR-code.




Onboarding

Na de succesvolle installatie van de app tikt u op het PETRACKR[®]-pictogram om de app te starten. U wordt begroet door het beginscherm, dat gedurende 5 seconden wordt weergegeven.

De onboarding-schermen geven basisinformatie over de functionaliteiten van de app.

U kunt tussen de schermen bladeren of ze overslaan en meteen naar het laatste scherm gaan.

Om het inlogproces te starten, tikt u op "Get Started" [Aan de slag].

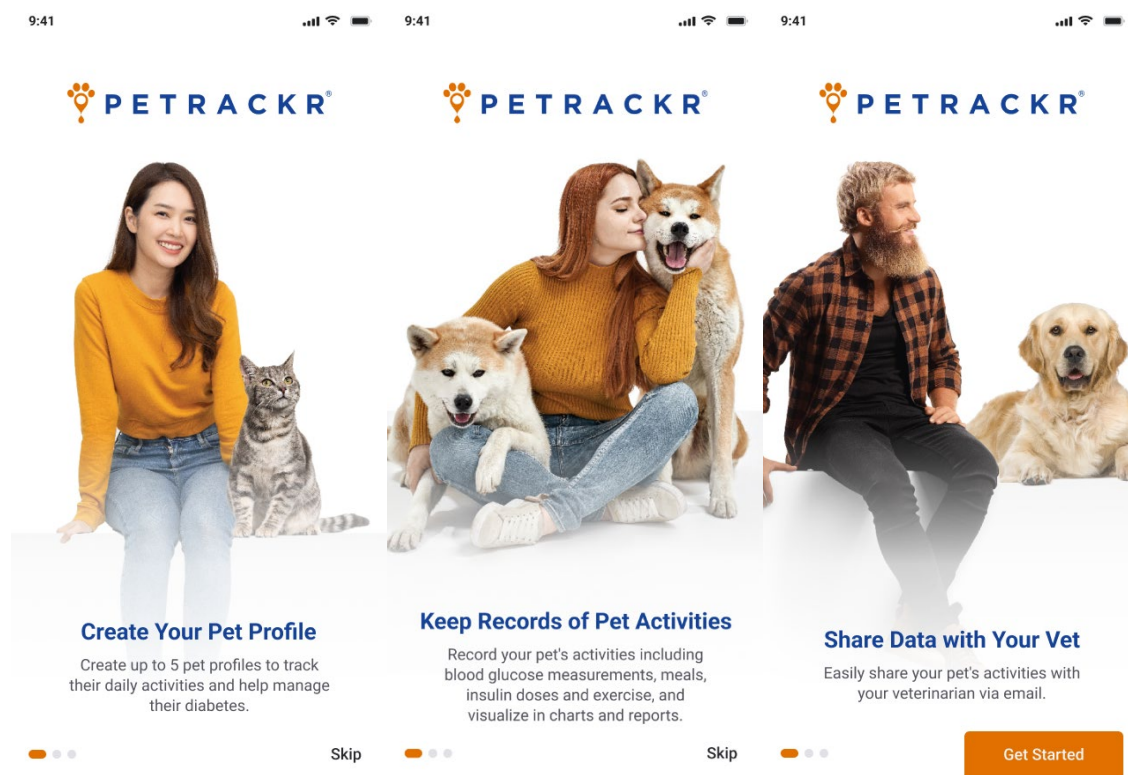

Een gebruikersaccount aanmaken

De app biedt de mogelijkheid om in te loggen met uw bestaande Google- of Apple-inloggegevens of om een account aan te maken met een geldig e-mailadres.

Inloggen met e-mailadres

Als u uw PETRACKR®-account al hebt geverifieerd, voer dan uw geldige e-mailadres en wachtwoord in en tik op "Log In" [Inloggen].

Als u al een huisdierprofiel hebt aangemaakt, wordt u doorgestuurd naar het dashboardscherm (zie pagina 17). Anders verschijnt het PETRACKR®-glucosemeterbeschikbaarheidsscherm om een huisdierprofiel aan te maken (zie pagina 15).

Opmerking: Als u het wachtwoord niet meer weet (zie pagina 35).

Inloggen met uw Google/Apple ID:



Google-authenticatie

U kunt inloggen met Google-authenticatie op zowel Android als iOS.

Om in te loggen met Google-authenticatie tikt u op de Google-knop. Mogelijk wordt u gevraagd uw Google-inloggegevens te verifiëren.

Na verificatie krijgt u de melding dat PETRACKR® toegang wil tot uw Google-account. Nadat u toegang hebt toegestaan, wordt u doorgestuurd naar de PETRACKR®-app.


Selecteer uw land en tik dan op de knop "Create Account" [Account aanmaken] om een account aan te maken.

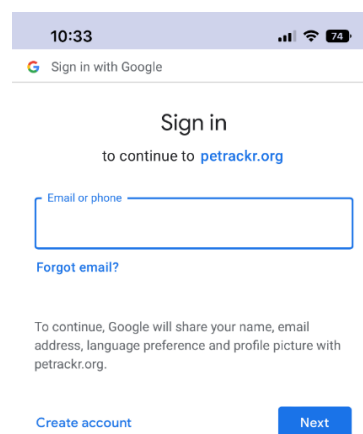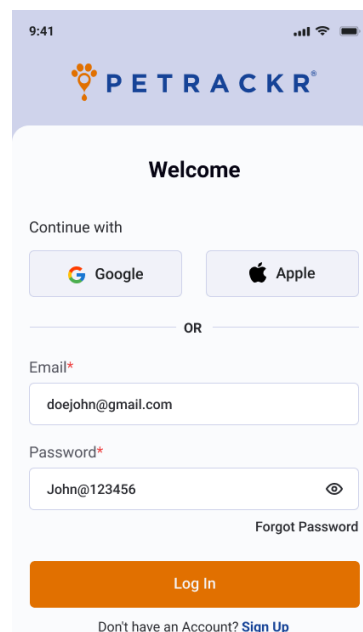

Apple-authenticatie (alleen iOS)

Om in te loggen met Apple-authenticatie tikt u op de Apple-knop. Mogelijk wordt u gevraagd om toestemming om een PETRACKR®-account aan te maken met uw Apple ID. Bij het aanmaken van een PETRACKR®-account hebt u de mogelijkheid om uw Apple ID privé te houden en uw e-mailadres niet te delen. Mogelijk wordt u gevraagd uw Apple-inloggegevens te verifiëren. Daarna wordt u doorgestuurd naar de PETRACKR®-app.

Selecteer uw land en tik dan op de knop "Create Account" [Account aanmaken] om een account aan te maken.


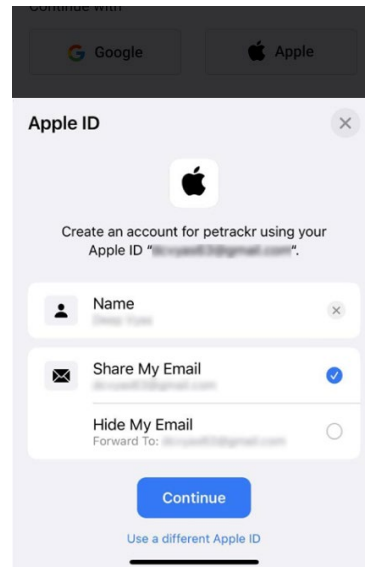


Algemene voorwaarden en privacybeleid

U kunt deze informatie op elk gewenst moment bekijken.

1. Log uit van het PETRACKR®-account (zie pagina 32).
2. Tik op de knop "Sign Up" [Registreren] op de inlogpagina (zie pagina 11).
3. Scroll op de inlogpagina helemaal naar beneden en tik op "Privacy Policy and Terms & Conditions" [Privacybeleid en Algemene voorwaarden] om het privacybeleid en de algemene voorwaarden te lezen.

Er zijn ook links om te schakelen tussen de Verenigde Staten, Australië en Algemene voorwaarden en Privacybeleid.

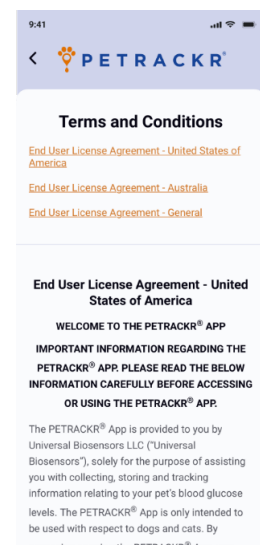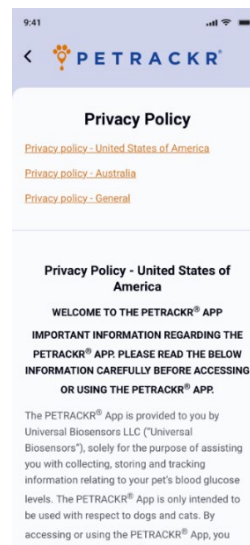

Registratiepagina

Als u nog geen account hebt aangemaakt, tikt u op "**Sign Up**" [Registreren] onder aan de inlogpagina (zie pagina 11).

In het venster "Get Started" [Aan de slag] voert u in de daarvoor bestemde velden uw gegevens in, zoals naam, e-mailadres, wachtwoord en land. Let erop dat uw wachtwoord aan de volgende criteria voldoet:

- Acht of meer tekens lang.
- Een combinatie van hoofdletters en kleine letters.
- Ten minste één cijfer en één speciaal teken.

Lees en accepteer de algemene voorwaarden, indien van toepassing.

Tik op de knop "Sign Up" [Registreren] als deze actief is om het registratieproces te voltooien.

Opmerking: De knop "Sign Up" [Registreren] is alleen actief als alle verplichte velden (aangegeven met een rood sterretje *) zijn ingevuld met geldige informatie en een wachtwoord dat voldoet aan de opgegeven criteria.


E-mailverificatie

Na succesvolle afronding van het registratieproces ontvangt u een e-mail met een link om uw account te activeren.

Nadat een geldig e-mailadres is ingevoerd, verschijnt er een pop-up die aangeeft dat het e-mailadres moet worden geverifieerd om het registratieproces te voltooien.

U kunt niet inloggen op de app totdat de verificatie van het e-mailadres is voltooid.

Tik op de inlogknop in het pop-upvenster om naar het inlogscherm te gaan.

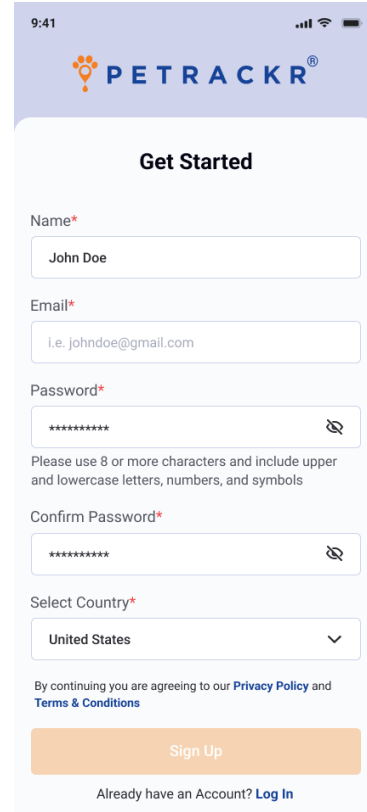

9:41

PETRACKR®

Get Started

Name*

John Doe

Email*

i.e. johndoe@gmail.com

Password*

Please use 8 or more characters and include upper and lowercase letters, numbers, and symbols

Confirm Password*


Select Country*

United States

By continuing you are agreeing to our [Privacy Policy](#) and [Terms & Conditions](#)

Sign Up

Already have an Account? [Log In](#)

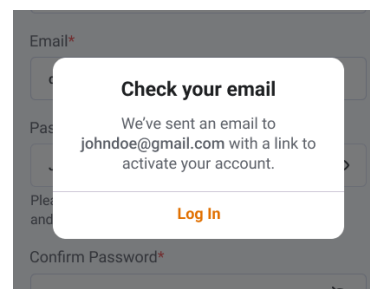

Email*

Check your email


We've sent an email to johndoe@gmail.com with a link to activate your account.

Log In


Confirm Password*

Zoek in uw e-mailaccount naar een e-mail van:

petrackr@universalbiosensors.com

Tik op  in de e-mail om uw e-mailadres te verifiëren. U ontvangt een bericht waarin wordt bevestigd of het e-mailadres is geverifieerd of dat de verificatie is mislukt.

De link voor de verificatie is 5 minuten geldig.

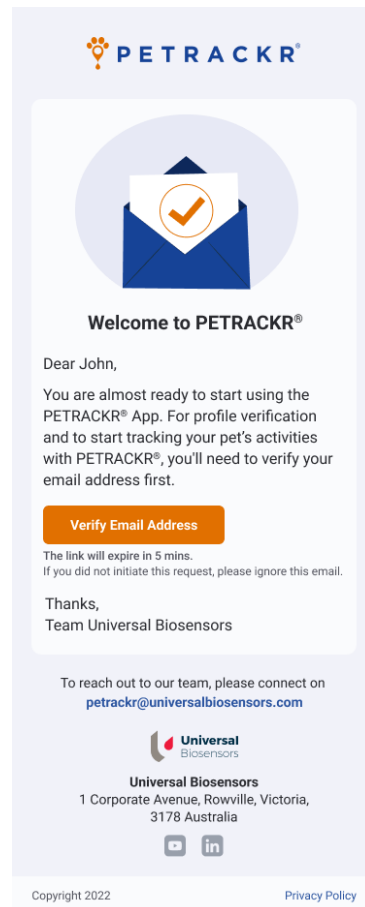

Uw eerste huisdierprofiel aanmaken


Om toegang te krijgen tot de functies en functionaliteiten van de app is het vereist om ten minste één huisdierprofiel toe te voegen.

Als u al een huisdierprofiel aan uw account hebt toegevoegd, wordt u doorgestuurd naar het hoofdscherm (zie pagina 17).

Een huisdierprofiel kan met of zonder de PETRACKR[®]-glucosemeter worden toegevoegd.

Na het inloggen op de app verschijnt er een scherm met de vraag of de PETRACKR[®]-glucosemeter beschikbaar is.

Om een huisdierprofiel met de PETRACKR[®]-glucosemeter te koppelen, tikt u op de knop "Yes" [Ja] in het PETRACKR[®]-glucosemeterbeschikbaarheidsscherm. Als u een standalone-profiel wilt aanmaken, tikt u op "No" [Nee].

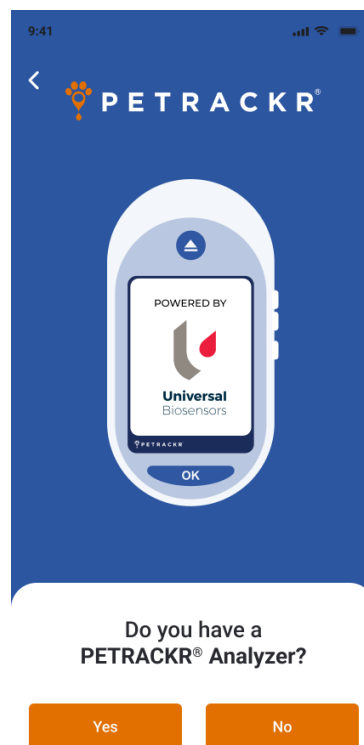


Een huisdierprofiel toevoegen met de PETRACKR[®]-glucosemeter

Als u hebt aangegeven dat u een PETRACKR[®]-glucosemeter hebt, gaat u naar de onboarding. Volg de instructies op het scherm voor het inschakelen en koppelen van uw PETRACKR[®]-glucosemeter.

U kunt tussen de schermen bladeren of ze overslaan en meteen naar het laatste scherm gaan. Raadpleeg de PETRACKR[®]-gebruikershandleiding voor meer informatie over het koppelen van uw PETRACKR[®]-glucosemeter.


Tik op "Continue" [Verder] om Bluetooth op uw mobiele apparaat in te schakelen en het zoeken naar uw PETRACKR[®]-glucosemeter te beginnen.

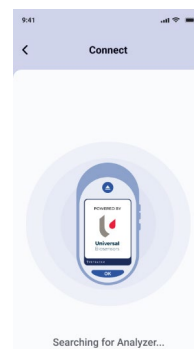

Glucosemeter koppelen


Nadat het zoeken is voltooid, wordt een lijst met alle PETRACKR®-glucosemeters in de buurt weergegeven.

Tik op de glucosemeter die u wilt koppelen. Er verschijnt een pincode op de PETRACKR®-glucosemeter. Voer de pincode in de app in om de glucosemeter te koppelen.

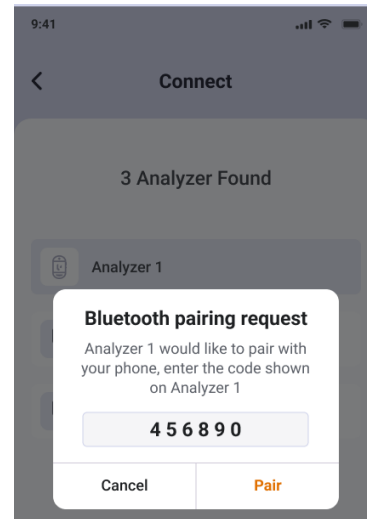


Glucosemeterprofiel koppelen

De app toont de huisdier-ID's die beschikbaar zijn op uw PETRACKR®-glucosemeter.

Tik op de huisdier-ID die u wilt koppelen met de mobiele app. Als de betreffende huisdier-ID niet in de lijst voorkomt en beschikbaar is op de gekoppelde glucosemeter, tikt u op de knop  Refresh.

Opmerking: Als er geen huisdier-ID's worden weergegeven, moet u eerst een huisdier toevoegen op de PETRACKR®-glucosemeter. Huisdierprofielen moeten op de PETRACKR®-glucosemeter worden aangemaakt voordat ze met de app kunnen worden gekoppeld. Tik op de knop  of raadpleeg de PETRACKR®-gebruikershandleiding voor meer informatie over het toevoegen van een profiel op uw PETRACKR®-glucosemeter. U kunt ook op "Add Pet Manually" [Huisdier handmatig toevoegen] tikken om een huisdier toe te voegen zonder te koppelen met een glucosemeter.

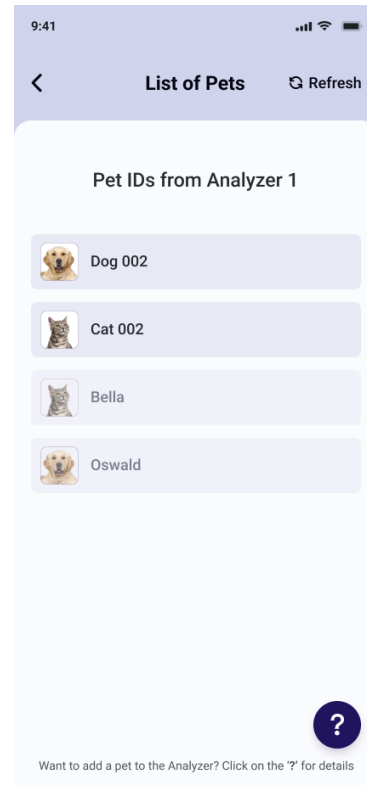

Een huisdierprofiel toevoegen zonder de PETRACKR[®]-glucosemeter

Als u "No" [Nee] hebt geselecteerd in het PETRACKR[®]-glucosemeterbeschikbaarheidsscherm, wordt u doorgestuurd naar het scherm "Add Pet" [Huisdier toevoegen].

Gegevens van uw huisdier toevoegen

In het scherm "Add Pet" [Huisdier toevoegen] kunt u de gegevens van uw huisdier toevoegen.

De naam van het huisdier wordt bijgewerkt op de glucosemeter (indien gekoppeld met de huisdier-ID). De geboortedatum wordt gebruikt om de leeftijd van het huisdier te bepalen.

Nadat u alle gegevens hebt ingevoerd, tikt u op "Save and Continue" [Opslaan en verder gaan] om het huisdier toe te voegen aan de app.

Als deze melding verschijnt, selecteert u "Add" [Toevoegen] om nog een huisdierprofiel toe te voegen of "Continue" [Verder gaan] om naar het dashboard te gaan.

Opmerking: Er kunnen maximaal vijf huisdieren aan de PETRACKR[®]-app worden toegevoegd.

9:41

< Add Pet

Pet's Name*
Oswald

Select Pet Species*
Dog

BG Range (mg/dL)*
70 low 143 high
Standard value based on pet species

Insulin Dose (IU)
10

Pet's Date of Birth
20 Jan 2021

Gender
Male

Breed
Australian Shepherd

Weight (kg)
27

Notes
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,


Save & Continue

Pet Saved
Continue, or add another pet?
Add Continue

Een bestaand huisdierprofiel met de glucosemeter koppelen


Een huisdierprofiel dat is aangemaakt in de app kan ook worden gekoppeld met een huisdier-ID op the PETRACKR®-glucosemeter.


Navigeer naar het betreffende huisdierprofiel in de mobiele PETRACKR®-app dat u met de glucosemeter wilt koppelen.

Tik op  om het koppelproces te starten. Dit brengt u naar het scherm "Pair Analyzer" [Glucosemeter koppelen].


Koppel de glucosemeter met uw apparaat. De app leidt u door het koppelproces. Raadpleeg de PETRACKR®-gebruikershandleiding voor meer informatie.



Als de koppeling met uw PETRACKR®-glucosemeter is gelukt, verschijnt het scherm "List of Pets" [Lijst met huisdieren]. Dit is een lijst met huisdierprofielen die beschikbaar zijn op de glucosemeter.


Selecteer de beschikbare huisdier-ID op de glucosemeter die u wilt koppelen. Reeds gekoppelde huisdierprofielen zijn niet actief en kunnen niet worden geselecteerd. Als het gewenste profiel niet in de lijst voorkomt en wel beschikbaar is op de gekoppelde glucosemeter, tikt u op de knop .

Opmerking: Huisdierprofielen moeten op de PETRACKR®-glucosemeter worden aangemaakt voordat ze met de app kunnen worden gekoppeld. Tik op de knop  of raadpleeg de PETRACKR®-gebruikershandleiding voor meer informatie over het toevoegen van een profiel op uw PETRACKR®-glucosemeter.

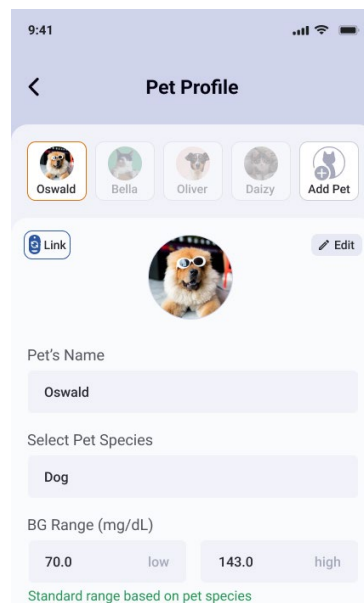Zodra er een succesvolle koppeling is gemaakt, wordt het scherm met het




huisdierprofiel weergegeven en wordt het pictogram  vervangen door het groene glucosemeterpictogram . Gegevens worden automatisch gesynchroniseerd.

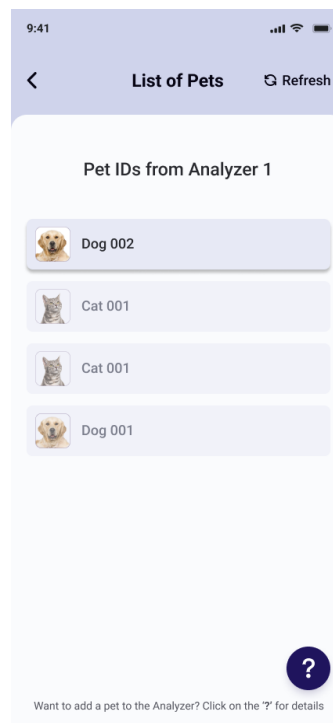

Dashboard

Het dashboard biedt toegang tot alle functies van de mobiele PETRACKR®-app:


1. Huisdierprofielen beheren en eenvoudig tussen huisdierprofielen schakelen.
2. De laatste resultaten bekijken of gegevens toevoegen voor het geselecteerde huisdier.
 - Bloedglucosemetingen opslaan (er moet een glucosemeter gekoppeld zijn)
 - Maaltijden, insulinedoses en beweging van uw huisdier opslaan
3. Herinneringen beheren voor soorten gebeurtenissen voor uw huisdier, zoals bloedglucosemetingen, maaltijden, insulinedoses en beweging.
4. Meldingen bekijken.
5. Toegang tot grafieken, logboek, rapporten en appinstellingen.

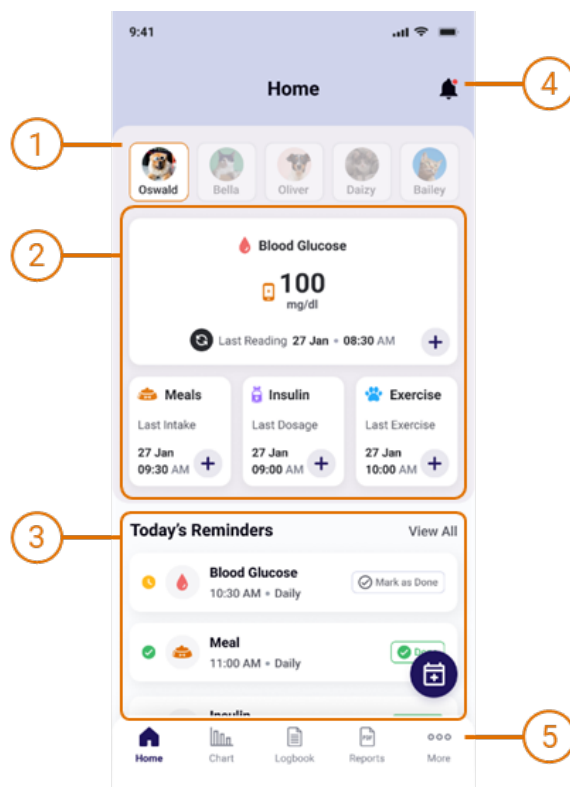

Een bloedglucosewaarde toevoegen


U kunt bloedglucosemetingen (BG) op twee manieren toevoegen voor geselecteerde huisdieren.

Synchroniseren met glucosemeter

Schakel uw glucosemeter in. Tik op het pictogram  op het dashboard. De gegevens van de gekoppelde glucosemeter worden gesynchroniseerd met de app.

Opmerking: Bluetooth moet zijn ingeschakeld op uw apparaat en de glucosemeter.

Bloedglucosewaarden handmatig toevoegen


Voor het handmatig toevoegen tikt u op  in het venster "Blood Glucose" [Bloedglucose]. Het scherm "Add Blood Glucose" [Bloedglucose toevoegen] verschijnt.

Voer de datum, tijd en gemeten waarde in. Er kunnen ook notities worden toegevoegd.

Tik op "Save" [Opslaan] om de gegevens in het logboek van het huisdier op te slaan.

Opmerking: Alleen gegevens van de afgelopen 7 dagen kunnen worden ingevoerd.

Opmerking: Het handmatig invoeren van bloedglucosewaarden is alleen mogelijk als de PETRACKR[®]-glucosemeter eerder is gekoppeld.

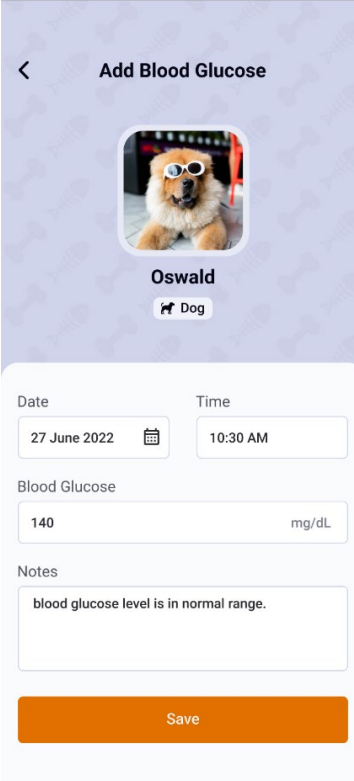

The screenshot shows the 'Add Blood Glucose' interface for a dog named Oswald. At the top, there is a back arrow and the title 'Add Blood Glucose'. Below the title is a circular profile picture of Oswald, a dog wearing sunglasses, with the name 'Oswald' and a 'Dog' icon below it. The form contains the following fields:

- Date:** 27 June 2022 (with a calendar icon)
- Time:** 10:30 AM
- Blood Glucose:** 140 mg/dL
- Notes:** blood glucose level is in normal range.

At the bottom of the form is an orange 'Save' button.


Een maaltijd toevoegen

Om een maaltijd toe te voegen, tikt u in het dashboard op het venster "Meals" [Maaltijden]. Het scherm "Add Meals" [Maaltijden toevoegen] verschijnt.

Voer de datum en tijd in waarop een maaltijd werd verstrekt. Er kunnen ook notities worden toegevoegd.


Tik op "Save" [Opslaan] om de gegevens in het logboek van het huisdier op te slaan.

Opmerking: Alleen gegevens van de afgelopen 7 dagen kunnen worden ingevoerd.

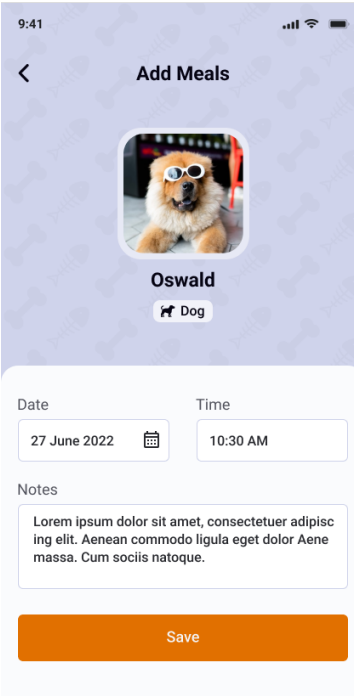


9:41


< Add Meals



Oswald

 Dog

Date Time

27 June 2022  10:30 AM

Notes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor Aenean massa. Cum sociis natoque.

Save


Een insulinedosis toevoegen

Om een insulinedosis toe te voegen, tikt u in het dashboard op het venster "Insulin" [Insuline]. Het scherm "Add Insulin" [Insuline toevoegen] verschijnt.

Voer de datum en tijd in waarop de insuline is toegediend en werk het insulinedoseringsveld bij indien nodig. Er kunnen ook notities worden toegevoegd.


Tik op "Save" [Opslaan] om de gegevens in het logboek van het huisdier op te slaan.

Opmerking: Alleen gegevens van de afgelopen 7 dagen kunnen worden ingevoerd.

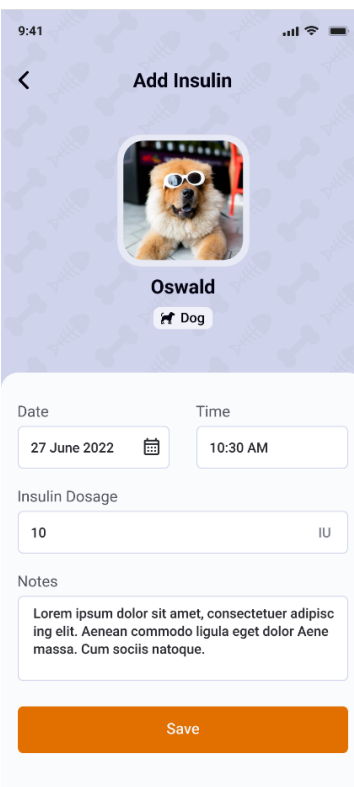


9:41


< Add Insulin



Oswald

 Dog

Date Time

27 June 2022  10:30 AM

Insulin Dosage

10 IU

Notes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor Aenean massa. Cum sociis natoque.

Save


Een beweging toevoegen

Om een beweging toe te voegen, tikt u in het dashboard op het venster "Exercise" [Beweging]. Het scherm "Add Exercise" [Beweging toevoegen] verschijnt.

Voer de datum, tijd en duur van de beweging in. Er kunnen ook notities worden toegevoegd.

Tik op "Save" [Opslaan] om de gegevens in het logboek van het huisdier op te slaan.

Opmerking: Alleen gegevens van de afgelopen 7 dagen kunnen worden ingevoerd.

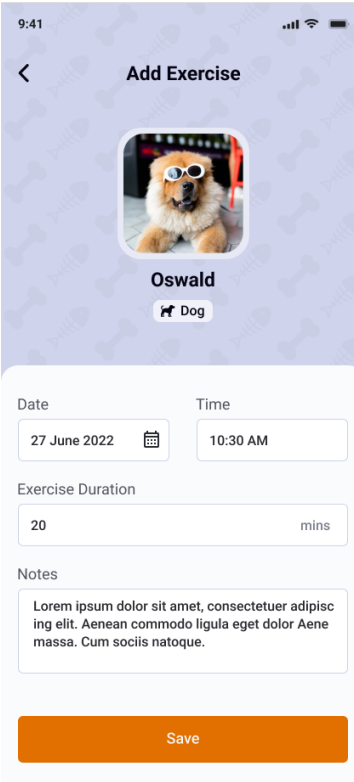

9:41

Add Exercise

Oswald

Dog

Date: 27 June 2022


Time: 10:30 AM

Exercise Duration: 20 mins

Notes: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor Aenean massa. Cum sociis natoque.

Save

Herinneringen


Om een herinnering toe te voegen, tikt u in het dashboard op de knop . Het scherm "Add Reminder" [Herinnering toevoegen] verschijnt. U kunt het type herinnering selecteren dat u wilt aanmaken, zoals bloedglucose, maaltijd of insuline.

Voer de datum en tijd in voor de herinnering. Er kunnen ook notities worden toegevoegd. Er zijn vier opties voor de herhalingsfrequentie van de herinneringen:

- **Geen:** de herinnering wordt niet herhaald.
- **Dagelijks:** de herinnering wordt elke dag herhaald.
- **Wekelijks:** de herinnering wordt elke 7 dagen herhaald.
- **30 dagen:** de herinnering wordt elke 30 dagen herhaald.

Tik op "Add" [Toevoegen] om de herinnering op te slaan.


Als de ingestelde tijd voor de herinnering is bereikt, ontvangt u een melding op uw apparaat ([zie pagina 24](#)).

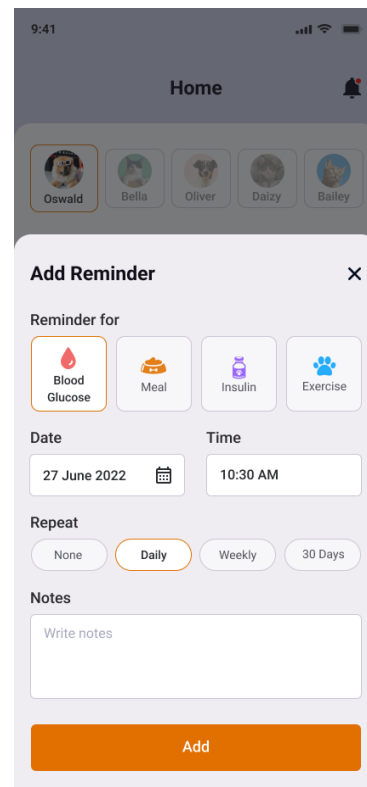

Meldingen


Als er een melding is, ziet u deze in de meldingenbalk van uw apparaat. Als u de melding selecteert, wordt u doorgestuurd naar het dashboardscherm.


U ontvangt meldingen binnen de app en buiten de app op basis van het type herinnering.

Om meldingen te bekijken, tikt u op het pictogram  rechtsboven in het dashboard.

Door een bepaald huisdierprofiel te selecteren, ziet u de meldingen voor dat specifieke huisdier.

Als "All" [Alle] is geselecteerd, worden meldingen voor alle beschikbare huisdierprofielen weergegeven.

Afzonderlijke meldingen kunnen worden gewist door op de knop  binnen elke melding te tikken. Met de "Clear All" [Alles wissen] kunt u alle meldingen uit de app verwijderen.

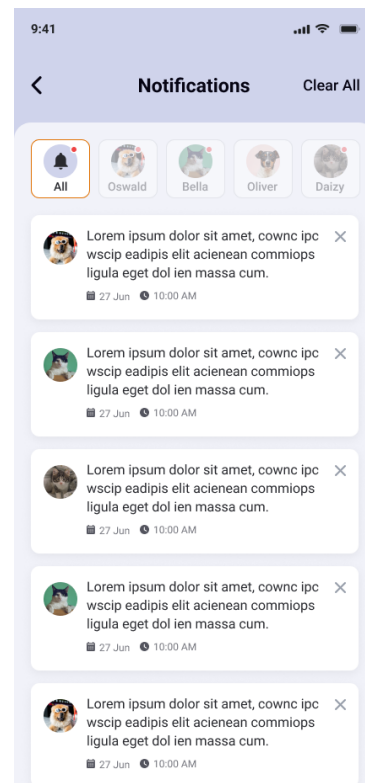

Logboek

Om het logboek te openen, tikt u gewoon op





Logboek in de onderste balk van het dashboard. Het logboek toont alle bloedglucosewaarden, maaltijden, insulinedoses en beweging die voor het geselecteerde huisdier zijn opgeslagen.

Als u de datum wilt wijzigen, tikt u op Filter om logbestanden te filteren op dag of maand en op logboektype. U kunt het filter ook op elk moment resetten door op de knop te tikken. Het logboek is standaard ingesteld op de huidige datum voor alle typen logbestanden.

U kunt ook nieuwe logbestanden toevoegen door in het scherm "Logboek" [Logboek] op de zwevende knop te tikken.

Om een logbestand te bewerken of te verwijderen, tikt u gewoon op het betreffende logbestand.

Opmerking: Bloedglucosewaarden die zijn toegevoegd met de PETRACKR[®]-glucosemeter kunnen niet worden bewerkt. Alleen de notities bij deze gegevens kunnen worden bewerkt.

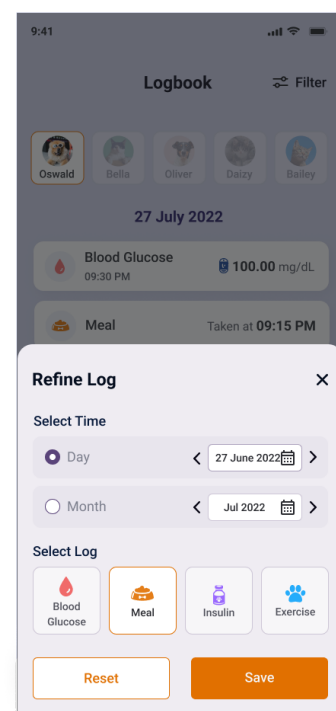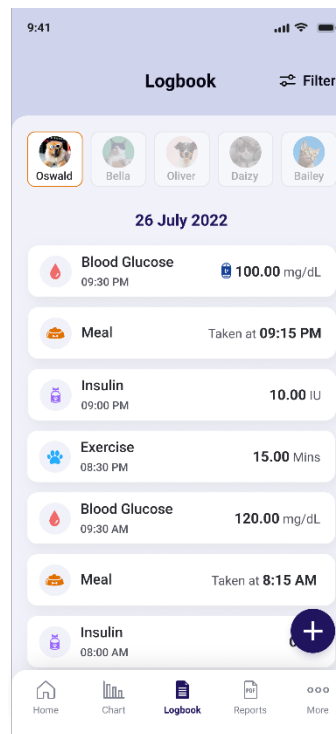

Grafieken


Grafieken bieden een visuele weergave van bloedglucosewaarden. Om de grafieken te



openen, tikt u op **Chart** in de onderste balk van het dashboard.

In het scherm "Chart" [Grafiek] kunt u het volgende doen:

1. Een specifiek huisdier selecteren en de bloedglucosewaarden in de vorm van een grafiek bekijken.
2. Tussen de weergaveperioden dag, week en maand wisselen.
 - Om de weergegeven datum of periode te wijzigen, tikt u op **<** om een vorige of op **>** om de volgende periode te selecteren.
 - Om direct een datum te selecteren, tikt u op een willekeurige plek in het veld **24 Jul 2022** om de datumkiezer te openen.
3. Het grafiekpaneel toont de bloedglucosegegevens (zie pagina 27).
4. Samenvattende statistieken voor de weergegeven gegevens bekijken (zie pagina 28).

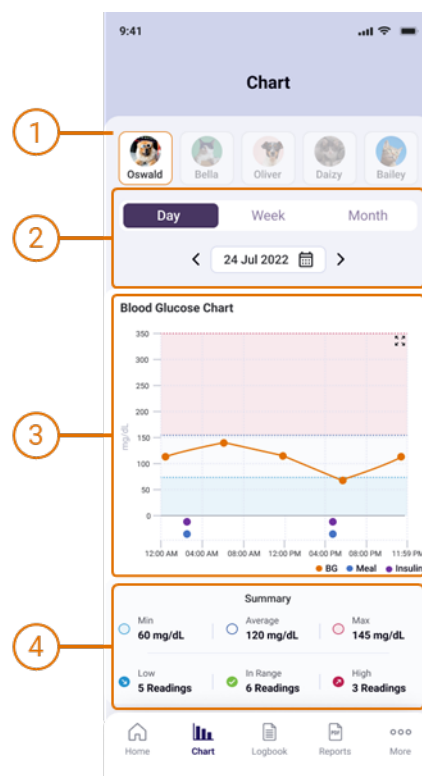

Grafiekpaneel



De grafiek toont de geregistreerde gegevens voor een bepaalde periode. De grafiek heeft de volgende functionaliteiten:


1. De lijngrafiek maakt gebruik van lijnen om individuele bloedglucosegegevenspunten met elkaar te verbinden. **Daggrafiek**
Gegevenspunten geven de geregistreerde waarden weer, met de tijd van de dag als horizontale as.
Week- en maandgrafiek
Er zijn drie lijngrafieken, die het minimum, gemiddelde en maximum voor elke dag weergeven, met de datum als horizontale as.
2. Insulinegegevens worden aangegeven door ●, maaltijdgegevens worden aangegeven door ●.

Opmerking: Deze zijn alleen zichtbaar op de daggrafiek.

3. De achtergrond van de grafiek geeft het bloedglucosebereik aan dat is opgegeven in het huisdierprofiel (zie pagina 36).
 - Een gegevenspunt in het middelste witte gebied geeft aan dat die waarde binnen het geconfigureerde bereik ligt.
 - Een gegevenspunt in het onderste lichtblauwe gebied geeft aan dat die waarde onder de ondergrens van het bloedglucosebereik ligt.
 - Een gegevenspunt in het bovenste rode gebied geeft aan dat die waarde boven de bovengrens van het bloedglucosebereik ligt.
4. De horizontale as geeft de tijd- of datumschaal voor de gegevenspunten aan.





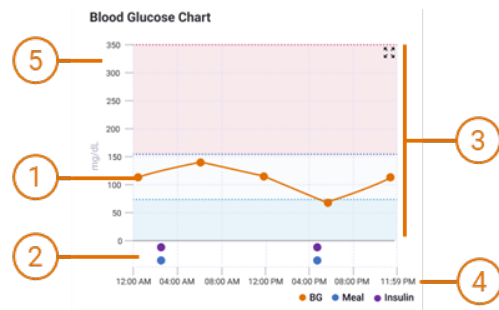

5. De verticale as geeft de bloedglucosewaarde voor de gegevenspunten aan.


Om de grafiek beter en gedetailleerder te bekijken, tikt u op  in de bloedglucosegrafiek om de grafiek in liggend formaat te bekijken. Om terug te keren naar staand formaat, tikt u op .



Samenvattingspaneel

Met het samenvattingspaneel kan de geselecteerde periode snel worden beoordeeld. Het helpt bij het identificeren van gevallen waarin waarden buiten het gewenste bereik liggen.

-  Min De laagste bloedglucosewaarde.
-  Average Het gemiddelde van de bloedglucosewaarden.
-  Max De hoogste bloedglucosewaarde.
-  Low Aantal waarden onder de ondergrens van het bloedglucosebereik.
-  In Range Aantal waarden binnen het bloedglucosebereik.
-  High Aantal waarden boven de bovengrens van het bloedglucosebereik.

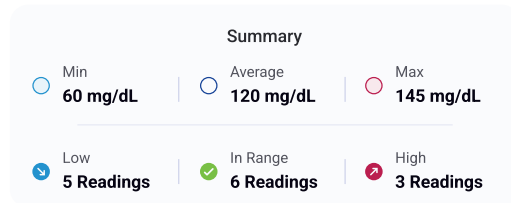

Rapporten

Uw mobiele PETRACKR®-app biedt ook de mogelijkheid om een rapport van uw huisdier te downloaden en te delen met uw dierenarts voor het diabetesmanagement van uw huisdier.




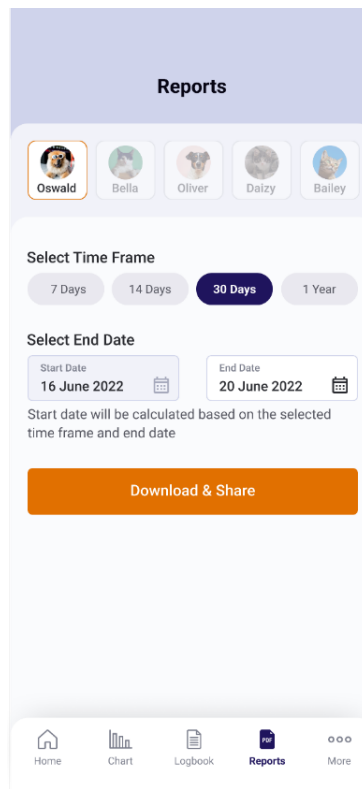
Om rapporten te openen, tikt u op **Reports** in de onderste balk van het dashboard.

Selecteer uw huisdier en de gewenste periode.

U kunt de volgende perioden kiezen: 7 dagen, 14 dagen, 30 dagen of 1 jaar. U kunt de wisselknop selecteren om tussen de verschillende perioden te wisselen.

Voer de gewenste einddatum voor het rapport in. De begindatum wordt automatisch aangepast op basis van de geselecteerde periode.


Om een rapport te downloaden en te delen, tikt u op de knop . Het rapport wordt gegenereerd en er verschijnt een pop-up om het PDF-rapport meteen te delen.



PDF-rapport

PDF-bestand met samengevatte informatie voor de geselecteerde rapportageperiode.

1. Gegevens van het huisdier, zoals naam, foto, ras, leeftijd en ingesteld bloedglucosebereik.
2. Overzichtspaneel met een samenvatting van de gegevens voor de rapportageperiode.
3. Bloedglucosegrafiek met de gemiddelde bloedglucosewaarde en gerapporteerde bereiken voor de periode.
4. Datum van het rapport.
5. Datumbereik voor het rapport.

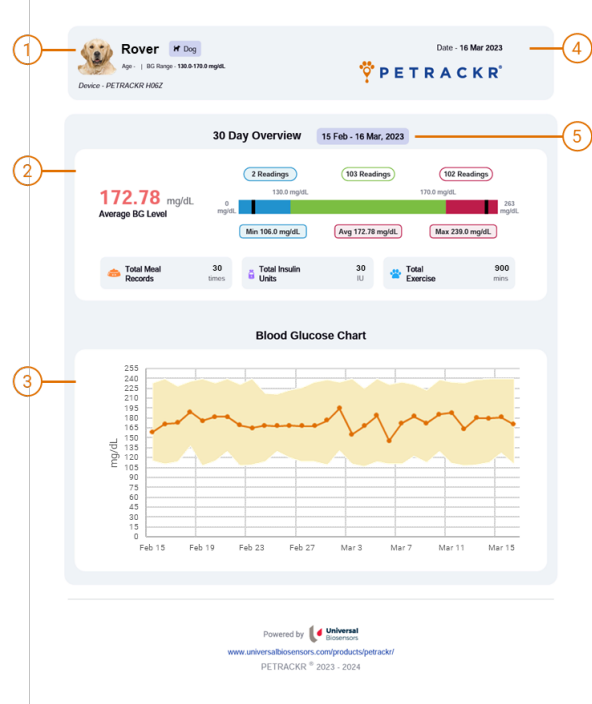

Overzichtsgrafiek

De overzichtsgrafiek geeft een visueel overzicht van de rapportageperiode. Het volgende wordt weergegeven:

1. Gemiddelde bloedglucosewaarde.
2. Aantal waarden onder de ingestelde ondergrens van het bereik.
3. Aantal waarden binnen het bereik.
4. Aantal waarden boven de ingestelde bovengrens van het bereik.
5. Laagst gemeten bloedglucosewaarde.
6. Hoogst gemeten bloedglucosewaarde.
7. Laagst gemeten bloedglucosewaarde.
8. Gemiddelde bloedglucosewaarde.
9. Hoogst gemeten bloedglucosewaarde.



Samenvatting gebeurtenissenlogboek

De samenvatting van het gebeurtenissenlogboek geeft het totaal weer van alle gerapporteerde gebeurtenissen (maaltijden, insuline-eenheden en beweging).




Bloedglucosegrafiek


De bloedglucosegrafiek geeft een visuele weergave van alle gegevens die tijdens de rapportageperiode zijn verzameld.

Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

1. Bloedglucoseas.
2. Gemiddelde bloedglucosewaarde voor de dag (of maand).
3. Bereik van de bloedglucosewaarden die voor de dag (of maand) zijn verzameld.
4. Datum.

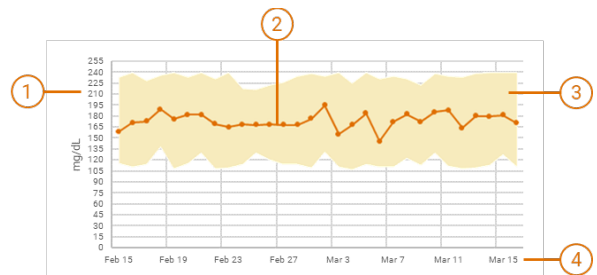


Accountinstellingen

Om de accountinstellingen te openen, tikt u op  in de onderste balk van het dashboard.


In de accountinstellingen kunt u de app aanpassen aan uw voorkeuren. Daarvoor hebt u verschillende mogelijkheden. Voorbeelden van mogelijkheden zijn:

- **View Profile [Profiel bekijken]:** Gebruikersaccount beheren, inclusief uw naam, e-mailadres van account bekijken, wachtwoord aanpassen of account verwijderen.
- **Pet Profile [Huisdierprofiel]:** Toegang tot en beheren van de profielen van uw huisdieren, waar u informatie kunt bijwerken, zoals namen, bloedglucosebereik en andere relevante gegevens.
- **Reminders [Herinneringen]:** Herinneringen instellen en beheren voor gebeurtenissen, taken of medicatieschema's met betrekking tot uw huisdieren.
- **My Analyzers [Mijn glucosemeters]:** Glucosemeters die aan uw account zijn gekoppeld controleren en beheren. Dit omvat het hernoemen van glucosemeters, het aansluiten van nieuwe glucosemeters en het verwijderen van bestaande glucosemeters.
- **Settings [Instellingen]:** Verschillende instellingen om uw app te personaliseren, zoals de bloedglucose-eenheid, gewichtseenheid, tijdnotatie en voorkeursinstellingen voor meldingen.
- **Logout [Uitloggen]:** Uitloggen van uw account om de veiligheid en privacy van uw gegevens te waarborgen.

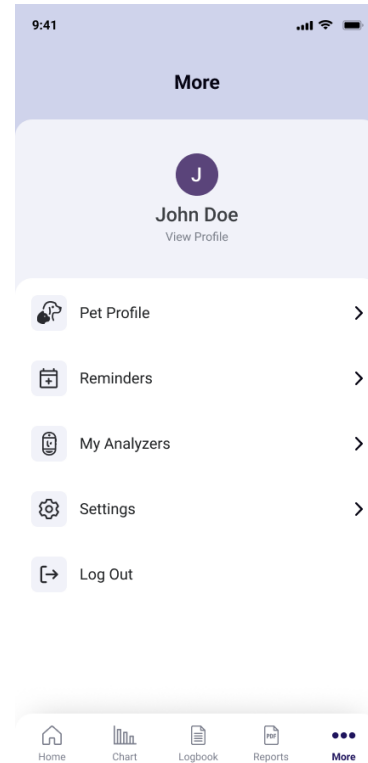

Gebruikersprofiel

Tik op [View Profile](#) om de gebruikersinformatie te openen.

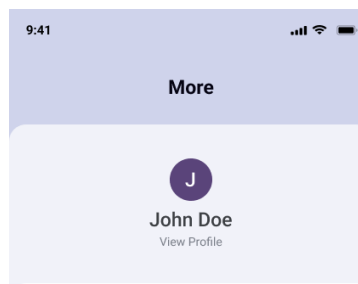


Naam wijzigen

Om de profielnaam te wijzigen, tikt u in het veld "Name" [Naam] om te bewerken.

Opmerking: Het veld "Name" [Naam] mag niet leeg zijn.

Wachtwoord wijzigen

Om het wachtwoord van het account te wijzigen, tikt u op de optie "Change Password" [Wachtwoord wijzigen].

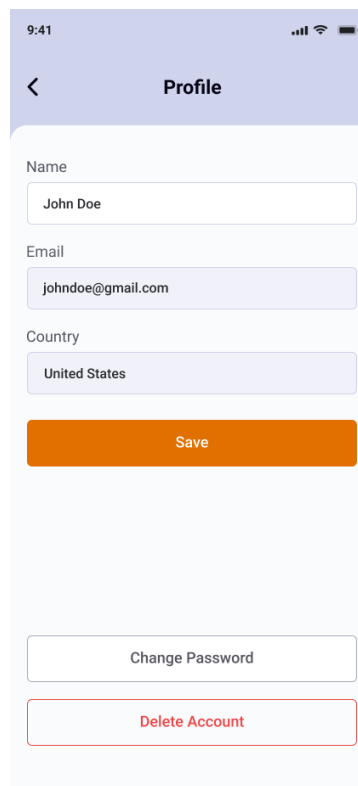


Voer vervolgens uw nieuwe wachtwoord in en let erop dat het voldoet aan de opgegeven criteria ([zie pagina 13](#)).

Voer het wachtwoord opnieuw in het veld "Confirm Password" [Wachtwoord bevestigen] in.

Als beide wachtwoorden overeenkomen, wordt de knop "Update Password" [Wachtwoord bijwerken] actief. Tik op de knop om de wijziging van het wachtwoord te bevestigen.

Er verschijnt een bevestigingsmelding die aangeeft dat uw wachtwoord is bijgewerkt.

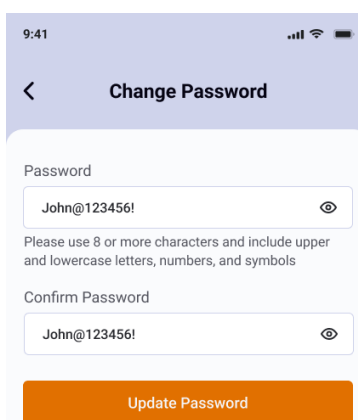

Account wissen


Als een account wordt gewist, zijn alle profielinformatie en opgeslagen gegevens, inclusief patiëntdossiers, voorgoed verloren.

Opmerking: Controleer voordat u een account wist of u alle belangrijke informatie hebt geëxporteerd.

Scroll naar beneden en tik op de knop "Delete Account" [Account wissen].

Er verschijnt een pop-upvenster waarin u wordt gevraagd uw keuze te bevestigen.

Tik op "Cancel" [Annuleren] om het account te behouden of tik op "Delete" [Wissen] om uw account **definitief** te verwijderen.

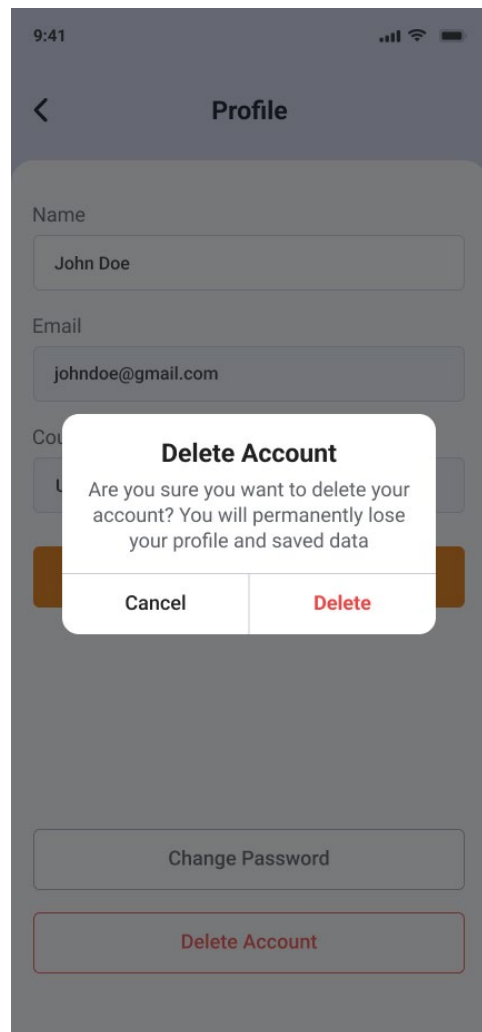


Wachtwoord vergeten

Als u het wachtwoord niet meer weet, tikt u op **Forgot Password** in het inlogscher (zie [pagina 11](#)).


Voer in het scherm "Forgot Password" [Wachtwoord vergeten] een geldig en bestaand e-mailadres in om de link voor het resetten van het wachtwoord te ontvangen.

Er wordt een e-mail naar uw e-mailadres gestuurd om uw wachtwoord opnieuw in te stellen. Volg de instructies in de e-mail om het wachtwoord opnieuw in te stellen.

Als dat gelukt is, kunt u inloggen met het nieuwe wachtwoord.

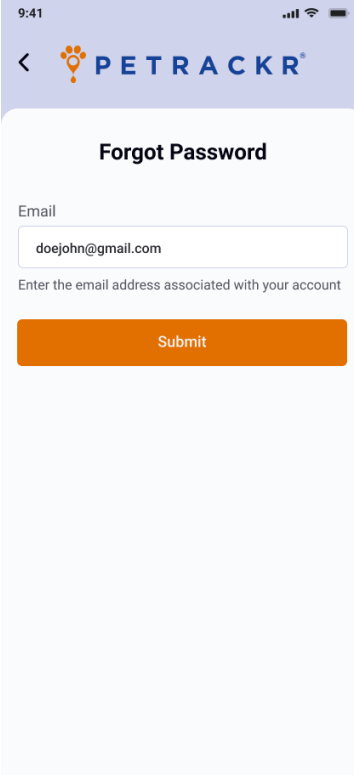

9:41

<  PETRACKR®

Forgot Password

Email


Enter the email address associated with your account

Submit

Huisdierprofiel


U kunt de gegevens van uw huisdier in het huisdierprofiel wijzigen. Denk daarbij aan de naam van uw huisdier, het bloedglucosebereik (BG), een foto van uw huisdier, de insulinedosis, geboortedatum, ras, gewicht en notities.


Om een huisdierprofiel te bewerken, tikt u op "Pet Profile" [Huisdierprofiel] in het scherm "More Settings" [Meer instellingen] en navigeert u naar het betreffende huisdierprofiel.

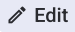Tik op  in het scherm "Pet Profile" [Huisdierprofiel].

LET OP: Bloedglucosebereiken mogen alleen worden aangepast op advies van uw dierenarts.

Opmerking: Als het huisdierprofiel is gekoppeld met een huisdier-ID op de PETRACKR®-glucosemeter, moet de glucosemeter ingeschakeld zijn en verbonden zijn met uw apparaat.


Om de wijzigingen op te slaan, tikt u op de knop  onder aan het scherm.

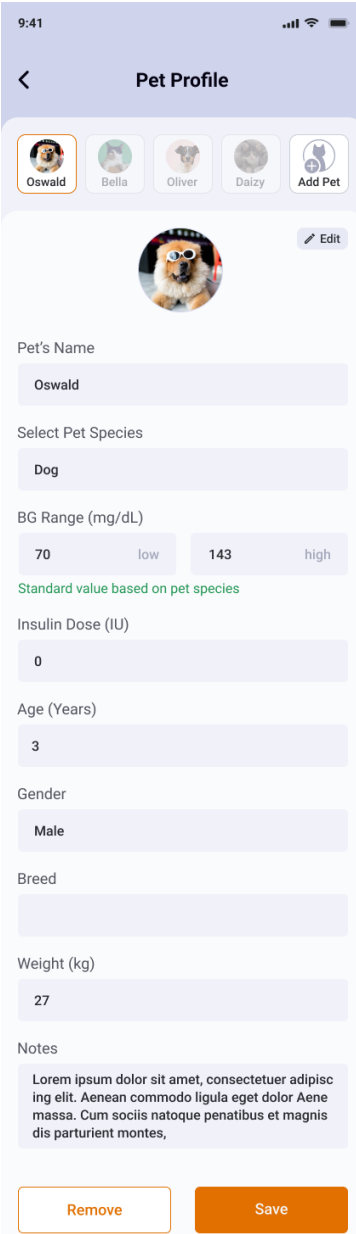

9:41

Pet Profile

Oswald Bella Oliver Daizy Add Pet

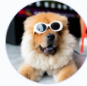 Edit

Pet's Name
Oswald

Select Pet Species
Dog

BG Range (mg/dL)
70 low 143 high
Standard value based on pet species

Insulin Dose (IU)
0

Age (Years)
3

Gender
Male

Breed

Weight (kg)
27

Notes
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,

Remove Save

Problemen oplossen

Klantenservice

U kunt de klantenservice van PETRACKR® bereiken via
Petrackr@universalbiosensors.com

Foutmeldingen en andere meldingen

De mobiele PETRACKR®-app meldt als er problemen zijn met de glucosemeter of de mobiele app. Onjuist gebruik kan leiden tot een onnauwkeurig resultaat zonder foutmelding.

Opmerking: Neem contact op met de klantenservice als de app geopend is maar niet werkt.



UNIVERSAL BIOSENSORS PTY LTD,

1 Corporate Avenue

Rowville, Victoria 3187 Australië

www.universalbiosensors.com

Petrackr@universalbiosensors.com

© 2023 Universal Biosensors Pty Ltd

PETRACKR® en het PETRACKR-logo zijn

geregistreerde handelsmerken van

Universal Biosensors. Alle rechten

voorbehouden.

Neem contact met ons op via

www.universalbiosensors.com/contact-us/

Als u de klantenservice niet kunt bereiken,

neem dan contact op met uw dierenarts

voor advies.

79229 v1.2

Herzieningsdatum: 01/2024