


Dispositivo de punción ajustable con eyector

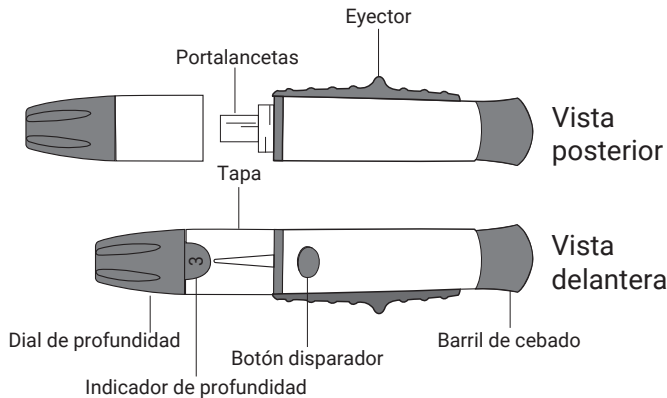

NO APTO PARA USO HUMANO.

Para uso exclusivo en gatos y perros.

El dispositivo de punción se utiliza con una lanceta de sangre desechable para obtener sangre del pabellón auricular o de la pata para realizar analíticas de sangre.



PRECAUCIÓN:

Para uso en una sola mascota, no compartir con otro animal.

Utilizar siempre una lanceta nueva y estéril. Las lancetas son para un solo uso.

Las lancetas reutilizadas podrían quedar sin filo o su punta podría estar doblada, lo que podría provocar daños en la piel, cicatrices y aumentar el dolor.

No apto para uso clínico ni para varias mascotas

www.universalbiosensors.com

Lea detenidamente todas las instrucciones antes de realizar pruebas


El dispositivo de punción PETRACKR® tiene 5 profundidades de penetración.

Gire el dial de profundidad hasta la profundidad de punción deseada.

Guía de profundidad de punción: número 1 para piel suave/fina, número 3 para piel normal, número 5 para piel gruesa/callosa y pueden realizarse ajustes más precisos si se coloca la flecha entre los números.

Limpieza y desinfección

Limpie la superficie del dispositivo de punción con un paño suave humedecido con agua limpia. No sumerja el cuerpo del dispositivo de punción en ningún líquido para evitar dañarlo. La superficie del dispositivo de punción se puede limpiar y desinfectar con etanol al 75 %. Si hay manchas de sangre en el interior de la tapa del dispositivo de punción, gire el dial de profundidad hasta la posición de la flecha «↔» y extraiga el dial de profundidad para limpiar las manchas de sangre con etanol al 75 % (como se muestra en la figura). Después de la desinfección, alinee la marca de flecha en el dial de profundidad con la flecha indicadora de profundidad y vuelva a instalar el dial de profundidad en la tapa.

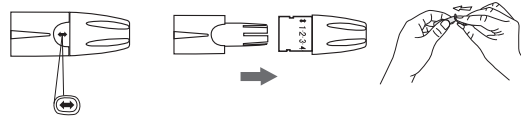

UNIVERSAL BIOSENSORS PTY LTD,
1 Corporate Avenue,
Rowville, Victoria, 3178 Australia
www.universalbiosensors.com


Petrackr@universalbiosensors.com

© 2022 Universal Biosensors Pty Ltd
PETRACKR® y el logotipo de PETRACKR son
marcas registradas de Universal Biosensors. Todos los derechos reservados.


79210V1.2.1

Fecha de revisión: 5/2023


Instrucciones de uso

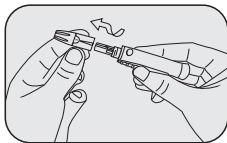


1. Lávese las manos con agua limpia y jabón, enjuáguelas y séquelas bien. Desenrosque la tapa del dispositivo de punción.

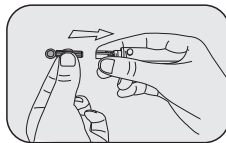


2. Presione la lanceta firmemente en el portalancetas.

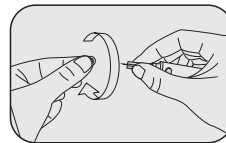


3. Retire la cubierta protectora de la lanceta.
Nota: Guarde la cubierta protectora para desechar la lanceta usada de forma segura.

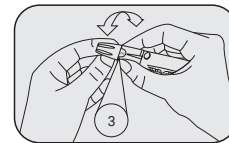


4. Ajustar a la profundidad adecuada.

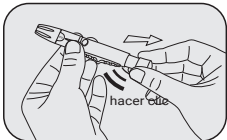


5. Tire suavemente del barril de cebado hasta oír un clic.

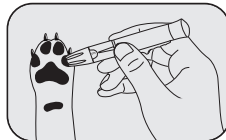

6. Coloque la tapa firmemente contra el pabellón auricular o la almohadilla de la pata. Presione el botón disparador.

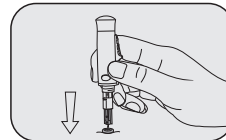

7. Retire la tapa y utilice la cubierta protectora de la lanceta guardada previamente para volver a tapar la lanceta.

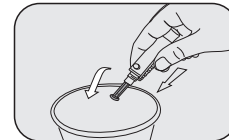

8. Empuje el eyector hacia delante para desechar la lanceta usada en el recipiente apropiado.



Código de lote



Fabricante



Precaución



Consulte las instrucciones de uso



Fecha de caducidad

